


# LOW VISCOSITY UNIT-DOSE TIP

## одноразовые канюли и пробки

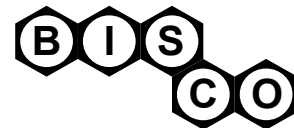


Одноразовые канюли и пробки Unit-Dose легко снаряжаются и подходят к основанию Шприца C-R любого стиля (за исключением C-R Jumbo).

Полупрозрачный фотоблокирующий оранжевый цвет допускает полный контроль за материалом, а также увеличивает время работы, предотвращая преждевременное отвердевание.

Полностью одноразовые, чтобы избежать перекрёстного загрязнения.


Канюли-Иглы AccuDose достигают дна корневых каналов и пазов под штифты, позволяя тем самым Вам наполнить их от низа к верху и снизить шансы появления воздушных пузырей и порозности.

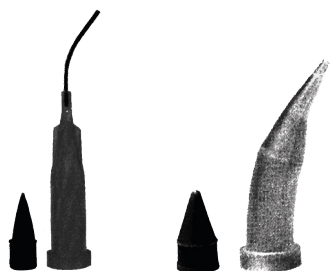


Для текучих цементов, стеклоиономеров и материалов для образования культи

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


1. Наполнить материалом канюлю. Не заполнять более чем на половину.
2. Вставить резиновую пробку в канюлю.
3. Вставить канюлю в шприц. Рекомендуется использовать шприцы фирмы Centrix.
4. Медленно выдавливать материал, с постоянным давлением.
5. После окончания снять и выкинуть использованную канюлю.

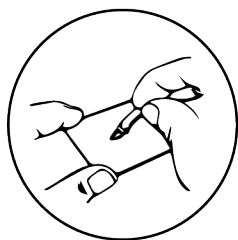


наполнить материалом

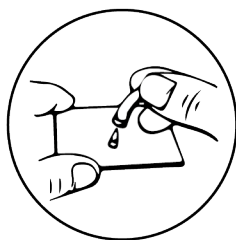

закреть пробкой

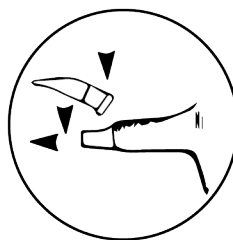

вставить канюлю  
в шприц

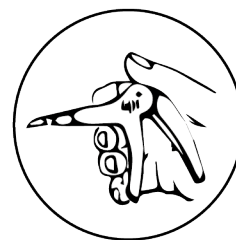

и вперёд

#### ВНИМАНИЕ:



Не применять химическую стерилизацию к пластмассовым деталям.

Не протирать использованные канюли спиртосодержащими или другими растворителями.

Low viscosity unit-dose tip 100 pkg  
Needle Tip Plugs (100)

X-80806P  
X-80808P

 BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.  
 1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

 ООО «Денко-Украина»  
бул.Т.Шевченко,1 оф.8  
Киев, 01004, Украина  
 (067) 506-51-65  
[www.denco.com.ua](http://www.denco.com.ua)



UA.TR.118.001.18