

Пінка для зупинки кровотечі

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ  
ПРЕПАРАТ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ЛИШЕ ЛІКАРЕМ-СТОМАТОЛОГОМ

**СКЛАД:** хлорид алюмінію 20%, вода фармацевтичного класу, допоміжні речовини.

**ЗАСТОСУВАННЯ**

Препарат ALUSTAT FOAM призначений для застосування у процесі стоматологічних процедур з метою зменшення незначних кровотеч. Хлорид алюмінію, що входить до складу препарату, призводить до скорочення дрібних кровоносних судин, внаслідок чого зменшується набряк ясен і призупиняється невелика кровотеча.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ**

Перед тим, як приступити до процедури аплікатор, що додається необхідно занурити в спирт (етанол), а потім приєднати до шприца. Для запобігання кровотечі: Нанести ALUSTAT FOAM безпосередньо на кровоточиві місця. Через 2 хвилини змити. У разі необхідності повторити дії. Для ретракції тканин:

1. З допомогою доданого аплікатора нанесіть ALUSTAT FOAM в ясневу борозну. Через 2 хвилини змити. або

2. Покласти в ясневу борозну ретракційну нитку, нанести ALUSTAT FOAM на нитку. Через 2 хвилини змити. Виріб призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для одноразового використання. Багаторазове використання аплікатора може провокувати небезпеку вторинної інфекції.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ**

Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ**

Може чинити подразнювальну дію на слизову оболонку порожнини рота, шкіру і очі. У разі тривалого подразнення, зверніться до лікаря. У разі проковтуванні не викликати блювоту. Випити велику кількість води. Зв'язатися з лікарем. Під час роботи з продуктом використовуйте одноразові рукавички і захисні окуляри.


**ЗБЕРІГАННЯ:**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25 ° С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності вказано на упаковці. Термін придатності на первинній упаковці. Після відкриття термін придатності препарату не змінюється, при умові щільного закриття препарату після кожного використання.

**ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ**

Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути виробнику.

**УПАКОВКА** Шприц, що містить 0,8 г препарату, одноразові аплікатори.

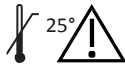

PPH CERKAMED Войцех Павловскі  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул. Квятковського 1  
тел/факс 00 48 15 842 3585

**Уповноважений  
представник в  
Україні та адреса:**

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «ІВОДЕНТ»

вул. Курінного Чорноти, 2,  
корпус 1, м. Івано-Франківськ,  
76018, Україна;  
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55  
e-mail: [info@ivodent.com.ua](mailto:info@ivodent.com.ua)  
[www.ivodent.com.ua](http://www.ivodent.com.ua)



UA.TR.101

Дата останнього оновлення: 18.07.2016/1