

# CANAL DETECTOR

Локалізатор усть кореневих каналів  
 ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ  
 ІНСТРУКЦІЮ

ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СКЛАД: метилен синій, пропіленгліколь, вода фармацевтичного класу.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Препарат CANAL DETECTOR призначений для локалізації усть кореневих каналів під час ендодонтичного лікування. Синій барвник, що міститься в препараті, проникає в гирло каналу і забаврює їх синім кольором, що полегшує пошук гирл кореневих каналів і розташування тріщин.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед початком процедури аплікатор, що додається необхідно занурити в спирт(етанол), а далі приєднати до шприца.

Видалити дентин у можливому місці гирла каналу, нанести 1-3 краплі препарату, почекати 5-10 секунд, потім прополоскати і висушити зуб. Крапки синього кольору вказують на устя кореневих каналів.

Після використання продукту слід відтягнути поршень шприца, щоб запобігти витоку надлишків препарату, відкрутити аплікатор, а потім закрити шприц білою кришкою. Виріб призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для одноразового використання. Повторне використання аплікатора може представляти небезпеку вторинної інфекції.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При роботі з препаратом застосовувати коффердам. Використовувати рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності є на основній упаковці.

Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.


ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ

Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути виробникові.

УПАКОВКА

Шприц, що містить 2 мл препарату, одноразові аплікатори з пензликом.



 CERKAMED Войцех Павловскі  
 37-450 Стальова Воля, Польща  
 вул. Квятковського, 1  
 тел./факс 0048 15 842-35-85

**Уповноважений  
 представник в  
 Україні та адреса:**



UA.TR.101

Товариство з обмеженою  
 відповідальністю «ІВОДЕНТ»

вул. Курінного Чорноти, 2,  
 корпус 1, м. Івано-Франківськ,  
 76018, Україна;  
 phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55  
 e-mail: [info@ivodent.com.ua](mailto:info@ivodent.com.ua)  
[www.ivodent.com.ua](http://www.ivodent.com.ua)