

# EUGENOL

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЮ  
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

CE 1011

Склад: 100% евгенол

## ПРИЗНАЧЕННЯ

EUGENOL - рідина для замішування паст, що використовуються для пломбування кореневих каналів, а також до матеріалів, які використовуються для тимчасового пломбування каріозних порожнин або для паст непрямого покриття зубної пульпи. Використовується в основному у поєднанні з оксидом цинку.

## СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Для тимчасового заповнення порожнин суміш повинна бути замішана таким чином, щоб паста не клеєлась до скляної ємкості або шпателя. Для заповнення кореневих каналів, отримана суміш повинна мати консистенцію крему.

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не слід використовувати у хворих з підвищеною чутливістю до інгредієнтів препарату.

Не слід використовувати в композитних матеріалах, так як евгенол перешкоджає полімеризації. Утримайтеся від застосування у вагітних жінок.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Може викликати алергічні реакції шкіри.

Викликає подразнення слизових оболонок рота і очей. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

При попаданні всередину, пити багато води, не викликайте блювоту. Зверніться до лікаря. При роботі з препаратом використовуйте коффердам. Одягайте рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C.

Берегти від сонячних променів.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності при зберіганні знаходиться на первинній упаковці.

Після відкриття термін дії не змінюється за умов щільного закриття флакона після кожного використання.

## ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ


Порожні упаковки повинні бути утилізовані або повернуті виробникові.

## УПАКОВКА

Флакон-крапельниця що містить 10 мл або 20 мл препарату.



PPH CERKAMED Войцех Павловскі  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул. Квятковського, 1  
тел./факс 0048 15 842-35-85

<b>Уповноважений представник в Україні та адреса:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
 UA.TR.101	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a>

Дата останнього оновлення: 10.04.2017/2