



TempoSIL® 2

Инструкции по применению

RU

Описание

TempoSIL 2 представляет собой временный рентгеноконтрастный цемент, на основе А-силикона, выпускаемый в двух оттенках – дентин и белый.

Состав материала

Оксид цинка
Полидиметилсилоксан

Область применения

- Временная фиксация реставрационных конструкций
- Временная фиксация реставраций на абатментах имплантов
- Временное фиксация постоянных коронок и мостовидных протезов
- Временное фиксация постоянных коронок и мостовидных протезов на абатментах имплантов

Рабочее время

Автосмешивание

Рабочее время ≤ 0:50 мин
Время отверждения ≥ 2:00 мин

Противопоказания

При применении в соответствии с инструкцией противопоказаний нет.

Побочные эффекты и взаимодействия

Поливинилсилоксаны обладают высокой степенью биологической совместимости; никаких опасных реакций и побочных эффектов у пациентов и медицинского персонала, работающих с этими материалами, не наблюдалось. Материал TempoSIL 2 предназначен для отверждения в полости рта.

Применение

1. Просушите поверхность зуба струей безмасляного воздуха. Не пересушивайте. Оптимальный результат достигается, когда

подготовленная поверхность зуба выглядит чуть влажной (блестит).

2. Очистите и высушите внутреннюю поверхность цементируемой реставрации.
3. Снимите и выбросьте защитную крышку со шприца.
4. Выдавите небольшое количество материала из шприца на бумажное полотенце или ткань, чтобы убедиться, что база и активатор поступают равномерно. Это гарантирует правильное смешивание компонентов.
5. Во избежание загрязнения компонентов немедленно удалите излишки материала.
6. Наденьте смесительную насадку на шприц, совместив выступы насадки с пазами на шприце. Для фиксации насадки на шприце поверните ее по часовой стрелке на 90°.
7. TempoSIL 2 наносится непосредственно из шприца на цементируемую конструкцию. С небольшим давлением позиционируйте ее и неподвижно удерживайте в течение 30–60 сек.
8. После отверждения удалите избыток материала (например, инструментом для удаления зубного камня).
9. После применения продезинфицируйте использованную смесительную насадку и шприц. Материал хранится с использованной смесительной насадкой в качестве крышки.

Смесительная насадка

Всегда храните шприц с TempoSIL 2 с надежной смесительной насадкой. Это обеспечивает герметичность шприца и исключает загрязнение. Снимите использованную смесительную насадку перед следующим применением материала. Выдавите материал из шприца, чтобы проверить, что материал поступает равномерно. Установите новую смесительную насадку.

Важно

Всегда работайте в перчатках.

Кожные выделения, латексные перчатки и поверхности, загрязненные прикосновением таких перчаток, могут нарушать процесс полимеризации А-силиконов. При отсутствии безлатексных перчаток необходимо работать тщательно промытыми чистыми руками (мыть моющим средством 15 сек., промывать водой еще 15 сек.). Отверждению материала также могут препятствовать вещества, содержащие эвгенол, гемостатики и некоторые анестетики.

Высокие температуры ускоряют процесс отверждения, а низкие замедляют его.

Маркировка

Срок годности и номер [LOT] указаны на упаковке и на шприце.

Срок годности и хранение

Производитель рекомендует не применять TempoSIL 2 после истечения срока годности. Для сохранения рабочих качеств TempoSIL 2 в течение срока годности рекомендуется хранить материал при температуре 15–23 °C / 59–73 °F. Беречь от нагрева и солнечного света.

Предназначен для профессионального применения стоматологами и зубными техниками