

Визначення

TempoSIL 2 - це тимчасовий рентгеноконтрастний А-силіконовий цемент з двома різними відтінками - дентинним та білим.

Вид матеріалу

Оксид цинку
Полідиметилсилоксан

Показання

- тимчасове цементування тимчасових реставрацій;
- тимчасове цементування тимчасових реставрацій на імплантаційних абатментах;
- тимчасове цементування остаточних коронок і мостоподібних протезів;
- тимчасове цементування остаточних коронок і мостоподібних протезів на імплантаційних абатментах.

Клінічний робочий час

Автоматичне змішування

Робочий час ≤ 0:50 хв.
Час затвердіння ≥ 2:00 хв.

Протипоказання

При дотриманні інструкції для застосування протипоказання не спостерігалися.

Побічні реакції / взаємодія з іншими речовинами

А-силікони мають високу біологічну сумісність, шкідливі або вторинні реакції у пацієнтів або стоматологічного персоналу не відомі. TempoSIL 2 призначений для інтраорального затвердіння.

Застосування

1. Обережно висушити безмасляним стисненим повітрям препаровану поверхню зуба. Не пересушувати. Найкращих результатів можна досягти, коли поверхня препарованого зуба виглядає вологою (блищить).
2. Очистити та висушити реставрацію всередині.
3. Зняти з шприца ковпачок та утилізувати.
4. Видавити невелику кількість матеріалу безпосередньо з шприца на паперову серветку, доки не стане очевидно, що видавлюється однакова кількість як бази, так і каталізатора. Це забезпечить належне змішування.
5. Негайно протерти випускний отвір шприца, щоб видалити надлишковий матеріал.
6. На шприц встановити насадку для змішування, вирівнявши зубчики всередині насадки для змішування з отвором шприца. Встановити на шприц та повернути за годинниковою стрілкою (90°), щоб зафіксувати її в цьому положенні.
7. Нанести TempoSIL 2 безпосередньо з шприца в тимчасову реставрацію. Встановити тимчасову реставрацію, злегка натиснувши. Не розподіляти протягом 30 - 60 с.
8. Після затвердіння видалити надлишки матеріалу (наприклад, скалером).
9. Після використання шприца дезінфікувати насадку для змішування та зберігати шприц зі встановленою насадкою для змішування.

Насадка для змішування

Завжди зберігати шприц TempoSIL 2 з встановленою насадкою для змішування. Це герметизує шприц і запобігає контамінації. Зняти насадку для змішування перед наступним використанням шприца. Надавити на шприц з метою перевірки, що матеріал витікає рівномірно. Встановити нову насадку для змішування.

Важливо

Завжди використовувати рукавички.

Секреція шкіри, латексні рукавички та поверхні, контаміновані латексними рукавичками, можуть негативно вплинути на процес затвердіння А-силіконів. Доторкайтеся до матеріалів та препаратів поверхонь виключно ретельно вимитими та сухими руками (мити впродовж 15 с миючим засобом, промити водою ще впродовж 15 с) або застосовуйте рукавички, що не містять латекс. Складові, що містять евгенол, гемостатичні речовини або деякі анестетики також можуть перешкодити затвердінню.

За високої температури затвердіння проходить швидше, а за низької - повільніше.

Маркування

Термін придатності та номери **LOT** вказані на упаковці та на шприці.

Термін придатності, умови зберігання

Виробник рекомендує утилізувати TempoSIL 2 після закінчення терміну придатності. Рекомендовано зберігати при температурі 15–23 °C / 59–73 °F, щоб забезпечити якість TempoSIL 2 до закінчення терміну придатності. Зберігати подалі від джерел тепла та попадання сонячних променів.

Увага

Згідно з федеральним законодавством цей виріб дозволено продавати лише стоматологам або за їх вказівкою.

Призначений для продажу виключно стоматологам та зуботехнічним лабораторіям або за їх вказівкою.

Дата випуску інструкції

02-2018

Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Notified body registration number



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal manufacturer



Expiry date

For SDS see:

www.coltene.com

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

